

evalyn®brush

تعليمات الاستعمال لاختبار HPV المنزلي

Rovers Medical Devices

Rovers Medical Devices متخصص في مجال تطوير أدوات لأخذ خلايا تستخدم للفحص الطبي. بناء على خبرته التي اكتسبها Rovers Medical Devices على مدى السنين في تطوير منتجات مختلفة خاصة للفحص الطبي وأيضاً في تدقيقها وإنتاجها، يصنع منتجات سليمة وموثوق بها. تنتمي Rovers® Cervex Brush® المطبقة في كل أنحاء العالم - والمعروفة بالمسحة - إلى مجموعة منتجات Rovers Medical Services.

المظهر الخارجي لفرشاة الاختبار المنزلي؟

Evalyn®Brush حوالي 20 سنتيمتر وهي مكونة من أنبوب شفاف مع أجنحة صغيرة. في الأنبوب مقبض وردي وفي طرفه الأول زر دوارة وردي وفي الطرف الآخر فرشاة بيضاء. في طرف الفرشاة يوجد غطاء وردي مثبت على الأنبوب. إذا أزلت الغطاء عن الأنبوب، يمكن لك إخراج الفرشاة البيضاء من داخل الأنبوب عن طريق دفع الزر الدوار الوردي باتجاه الأنبوب الشفاف.

صيغة RFEvafid-2014-02-AR

المنتج: Rovers Medical Devices BV

10 Lekstraat, 5347 KV Oss, هولندا

رقم الهاتف: +31 412 648870

رقم الفاكس: +31 412 623835

البريد الإلكتروني: info@roversmedicaldevices.com

الموقع: www.roversmedicaldevices.com



Rovers® Evalyn® Brush هو منتج تم تسجيل

براءة اختراعه وتصميمه.

Rovers® و Evalyn® هما علامتان مسجلتان


يملكهما Rovers Medical Devices B.V.

Oss, هولندا. © Rovers Medical Devices B.V.



CE 0044

STERILE EO

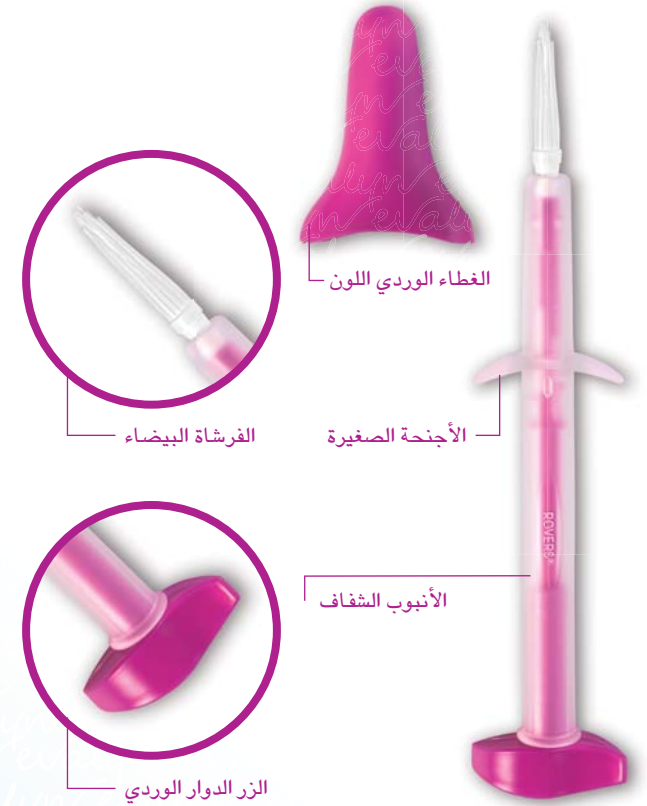


لماذا Evalyn®Brush؟


Evalyn®Brush هي أداة تم تطويرها خاصة من أجل أخذ عينة من الخلايا الموجودة في الفرج. Evalyn®Brush مجهزة بفرشاة ذات شعر دقيق وناعم، لكي تأخذي دائماً ما يكفي من عينة الخلايا.

تنطبق هذه التعليمات على استعمال Evalyn®Brush.


سهلة وسليمة وأمينة

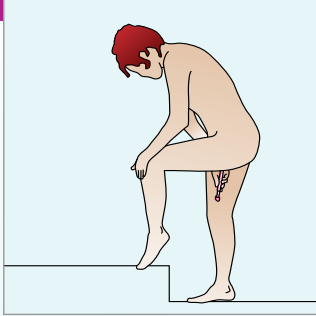


4. قومي بعملية أخذ العينة وأنت واقفة. قفي في وضع مريح (مثلا الوضع الذي تقفين فيه في حالة إدراج حشا).

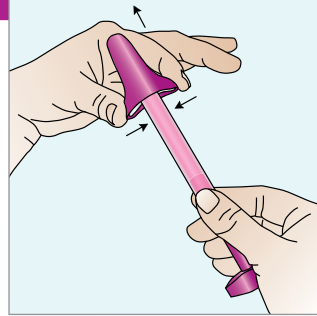


3. اضغطي بالإبهام والسبابة على جنبي الغطاء الوردي وأزيلي الغطاء الوردي عن Evalyn®Brush. لا تلمسي فرشاة Evalyn®Brush البيضاء بيديك!

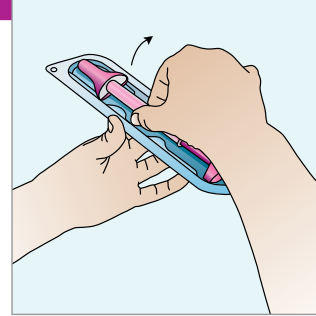


2. أخرجي Evalyn®Brush من غلافها. احتفظي بالغلاف لأنك سوف تحتاجين إليه لإرسال Evalyn®Brush فيه بعد الاستعمال.

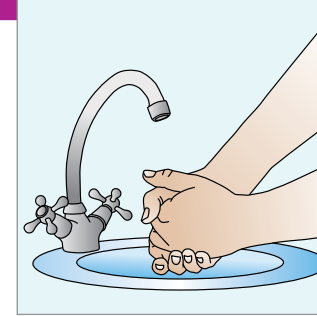


1. أولاً اغسلي يديك قبل البداية.

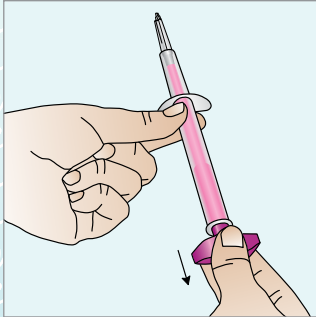


8. أمسكي بالأنبوب الشفاف باليد الأولى وباليد الأخرى تجزئين الزر الدوار الوردي بحيث تختفي الفرشاة البيضاء في الأنبوب. لا تمسّي الجزء فوق الأجنحة خلال هذه العملية.

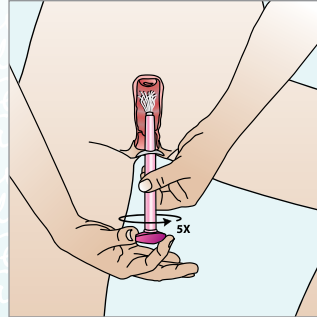


7. أدبري الزر الدوار الوردي 5 مرات في نفس الاتجاه. تسمعين صوت طقطقة بعد كل دورة؛ هكذا تعرفين متى تكونين قد أدبرته 5 مرات. بعد عملية الإدارة تخرجين Evalyn®Brush من الفرج.

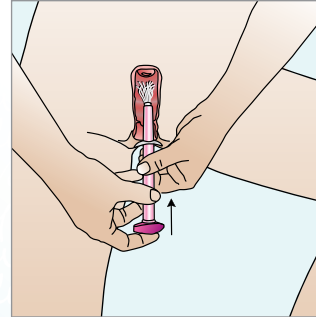


6. أمسكي بالأنبوب الشفاف باليد الأولى وباليد الأخرى تدفعين الزر الدوار الوردي باتجاه الأنبوب الشفاف. تسمعين وتشعرين بصوت طقطقة حينما تصل الفرشاة في موقعها الصحيح، والأن يضع الزر الدوار الوردي مقابل الأنبوب.

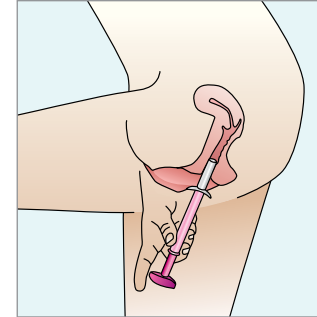


5. مددي الشفتين باليد الأولى وباليد الأخرى تدخلي Evalyn®Brush في الفرج، إلى أن تضغط الأجنحة الصغيرة إلى الشفتين.

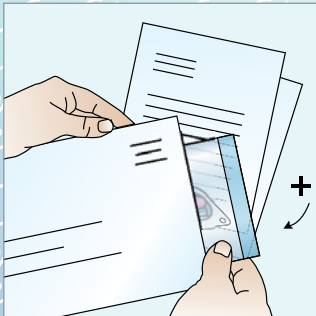


12. استعملي طرف الإعادة لإرسال الكيس البلاستيكي وفيه Evalyn®Brush.

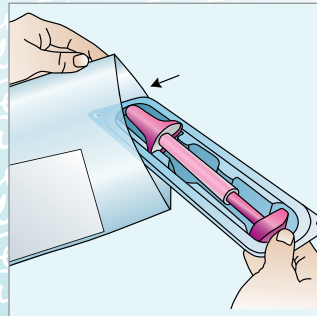

11. ضعي الغلاف وفيه Evalyn®Brush في الكيس البلاستيكي الصغير المرفق ثم أغلقيه.

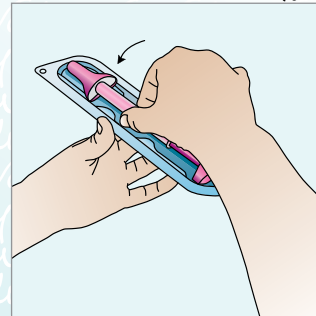

10. ضعي Evalyn®Brush في غلافها.

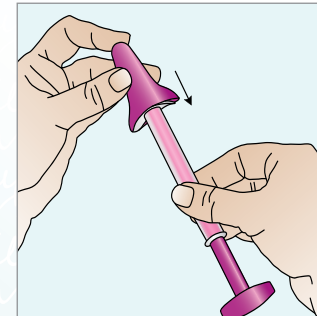

9. أمسكي بالأنبوب الشفاف بحيث لا تخرج الفرشاة البيضاء من جديد. أعيدي الغطاء الوردي إلى مكانه على Evalyn®Brush بالإبهام والسبابة. عندئذ تسمعين صوت طقطقة.

أداة Evalyn®Brush

Evalyn®Brush هي أداة معقمة يمكن لك استعمالها بنفسك للقيام بالاختبار المنزلي. باستعمال Evalyn®Brush تأخذين عينة من الخلايا في الفرج بطريقة سهلة وبلا ألم. وبعد ذلك يتم فحص عينة الخلايا هذه في مختبر محترف.

ماذا يجب عليك مراعاته؟

- عدم استعمالها إذا كان غلاف Evalyn®Brush مضرامكسوراً أو إذا كان تاريخ الصلاحية قد مضى.
- عدم استعمالها خلال الحيض (العادة الشهرية).
- عدم استعمالها خلال الحمل أو في الأشهر الثلاثة اللاحقة.
- التوقف عن استعمال منتجات تستعمل في الفرج قبل استعمال Evalyn®Brush بيومين على الأقل. مع ذلك فيجوز لك الاستمرار في استعمال وسائل لمنع الحمل في الفرج والواقى الذكري والمواد المرطقة.
- تستعمل لمرة واحدة فقط.
- تؤدي إعادة استعمالها إلى انتقال عدوى وتشخيص غير صحيح.